

NÓZI PORSZI

ORRSZÍVÓ KÉSZLET PORSZÍVÓHOZ



Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Ha a baba megfázik, náthás lesz, elkap valami légúti fertőzést, az bizony mind a gyermek, mind a szülők életét megnehezíti. A baba orrában felgyülemelő váladék akadályozhatja a szabad légzését, nyugtalanná teszi az alvását és étvágyát is elveheti. A lenyelt váladék hasfájást, hányást, hasmenést, ill. további fertőzéseket okozhat. A Nózi Porszi segít lerövidíteni ezt a nehéz időszakot, rendszeres használatával kíméletesen és hathatósan távolítja el a felgyülemlett váladékokat, és hoz fellelegzést a baba és a család életébe.

A Nózi Porszi egy hosszú csőből áll, melynek az egyik végét a porszívóhoz kell csatlakoztatni, míg a másik végét a gyermek orrlyukához tartani. A puha szívófejet kifejezetten izgó-mozgó csecsemőkhoz fejlesztettük ki, míg a kemény fejet kisgyermekekhez ajánljuk.


A Nózi Porszi előnyei:

- rendszeres használatával, a váladék eltávolítása után a gyermek könnyebben lélegezhet,
- az eszköz már újszülött kortól használható,
- fájdalommentes és biztonságos,
- a váladék eltávolítása gyorsabb gyógyulást eredményez,
- könnyen szétszedhető, és egyszerűen tisztítható,
- nem tartalmaz egészségre káros anyagot,
- a puha szívófejt orvosi szilikonból készült.

Anyaga: A puha szívófejt orvosi szilikon, a többi orvosi minőségű, latex- és BPA-mentes PVC.


Tartozékok:

- 1 db puha szívófejt
- 1 db kemény szívófejt
- 1 db belső cső
- 1 db váladékgyűjtő tartály
- 1 db rugalmas szilikon cső
- 1 db porszívó-csatlakozó harang
- 1 db tisztítókefe
- 1 db használati utasítás

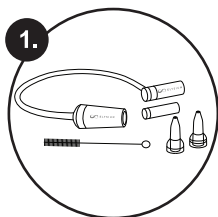


1. Állítsa össze a Nózi Porszit!

A kiválasztott szívófejt - puha vagy kemény - dugja rá a belső csövet annak peremezett végével.

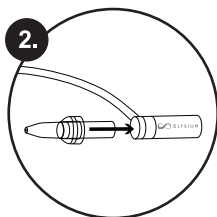


2. Az így elkészült egységet


csatlakoztassa a váladékgyűjtő tartályhoz.

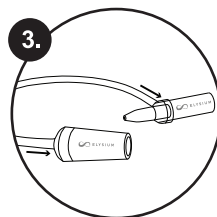


3. A szilikoncső egyik végét dugja rá a váladékgyűjtő tartályra, a másikat pedig a porszívó-csatlakozó harangra.

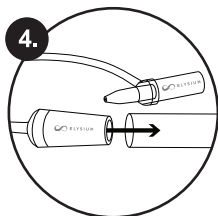

4. Csatlakoztassa a porszívócsőhöz. Tartsa a gyermek fejét stabilan. A Nózi Porszi máris használatra kész.

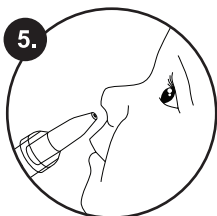

5. A szívófejtrel szívja ki a váladékokat először az egyik, majd a másik orrlyukból! A szívófejt fel-, le- és oldalra is mozgatható. Ha már nem jön több váladék, kapcsolja ki a porszívót.

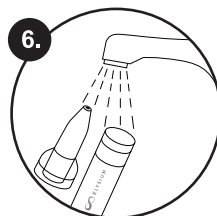

6. Szerelje szét a Nózi Porszit, majd mossa el.

Óvintézkedések:

- Ne akarja beledugni a szívófejet a gyermek orrába, elég, ha az ornyílásához odailleszti, és lezárja vele azt.
- Ügyeljen rá, hogy a váladékgyűjtő tartályból kiálló cső mindig felfelé álljon.
- A szívás néhány másodperces megszakításokkal történjék!
- Sűrű orrváladék esetén a nyálkahártya sérülésének elkerülése érdekében használhat orrcseppet, orrsprayt vagy sóoldatot.
- Előtte feltétlenül egyeztessen orvosával!
- Mindig az ellentétes oldalon kezdje a szívást, mint amelyiken bejuttatta a folyadékot.
- Ügyeljen a gyermek helyes és biztonságos tartására orrszívás közben.
- Figyeljen arra, hogy a kisebb gyermeket biztosan fogja, a

nagyobb pedig stabilan üljön.

- Az orvos által felírt, ill. javasolt nyálkahártya-duzzanatot csökkentő cseppeket és sprayket csak az orrszívást követően használja!
- Krónikus vérzékenység, orrvérzési hajlam, sebes ornyílás esetén az eszköz használata kiemelt figyelmet igényel.
- Sérült terméket ne használjon!
- Az orrszívó csak megfelelő műszaki állapotú háztartási porszívóval használható.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A Nózi Porszívó tisztítása előtt mindig húzza ki a porszívóból.

Helyes pozíció újszülött esetén:

Támassza meg a hátát, fejét egyenes állásba helyezve. Fontos, hogy ne hanyatt fekvésben legyen a baba, különben a váladék a garat irányába csorog.

Helyes pozíció kisgyermek korban:

Ülő helyzetben, fejét hajtsa előre a gyermek. Ha a gyerek együttműködő, akkor az ellentétes orrjáratot elszoríthatja a tökéletes vákuumképzés és az orrszívás idejének lerövidítése érdekében.

Tisztítása:

Az eszközt minden használat után meg kell tisztítani. Tisztítás előtt csatlakoztassa le az eszközt az áramtalanított porszívóról, majd szedje szét a termék főbb elemeit. Tisztításukhoz használja a tartozék kis kefét, miközben meleg - max. 70°C fokos -, antibakteriális, szappanos vízben átmossa azokat. Mosógatógépben nem tisztítható.

Tárolása: Száraz, hűvös helyen tárolandó.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károokért és sérülésekért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal!



Elysium Laboratories Kft.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

www.elysium.hu

info@elysium.hu

Forgalmazó: **Legal Beauty Kft.**

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

+36-70-7-999-999

www.virusmaszk.hu

info@virusmaszk.hu