


Használati utasítás

ELYSIUM E4 vérnyomásmérő

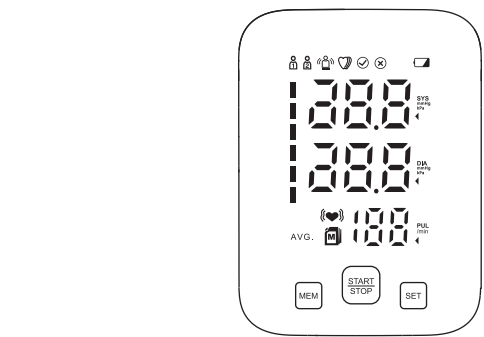

REF: AXD-809

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta az Elysium E4 vérnyomásmérő készüléket.

A vérnyomásmérés oszcillometriás módszerét használva ez a készülék könnyű kezelhetőséget és pontosságot biztosít, megbízhatóan méri a szisztolés és diasztolés vérnyomást, valamint a pulzust, így megkönnyíti a napi vérnyomás ellenőrzést.

Javasoljuk, hogy a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót.

Doboz tartalma:

- Készülék
- Mandzsetta (22-42 cm)
- Használati útmutató
- 4 db AAA alkáli elem

Biztonsági információk

A termék helyes használatának biztosítása érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági intézkedéseket, beleértve a jelen használati útmutatóban felsorolt figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.

A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK	
	FIGYELMEZTETÉS Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerülése nélkül halál vagy súlyos sérülés következhet be.
	VIGYÁZAT Olyan lehetséges veszélyhelyzet jelez, amit ha nem kerülnék el, a felhasználó vagy a beteg kisebb-nagyobb sérülését, illetve az eszköz vagy más tárgyak károsodását eredményezheti.

Figyelmeztetések és óvintézkedések


- △ Ez az készülék NEM helyettesíti a rendszeres orvosi vizsgálatokat.
- △ A készülék NEM alkalmas a betegségek kezelésére.
- △ Ez a készülék kizárólag felnőttek vérnyomás- és pulzusszámanak méréseére szolgál. Ne használja csecsemőkön vagy olyan személyeken, akik nem tudják kifejezni szándékukat.
- △ A vérnyomásával kapcsolatos konkrét információkért forduljon orvosához. Az őndiagnózis és a mért eredmények alapján történő kezelés veszélyes lehet. Kövesse orvosa vagy engedéllyel rendelkező egészségügyi személy utasításait.
- △ NE állítsa be a gyógyszeres kezelést a készülék mérési eredményei alapján. Szedje gyógyszereit az orvos által előírt módon.
- △ A magas vérnyomás diagnosztizálására és kezelésére kizárólag orvos jogosult.
- △ Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket. Ne használja a készüléket más célra. Az eredmények értékeléséhez és a kezeléshez mindig forduljon orvosához.
- △ Csak engedélyezett alkatrészeket és tartozékokat használjon. Az előírtaktól eltérő tartozékok használata működési hibát okozhat.
- △ Csak 1,5 V-os alkáli elemekkel működik a készülék. Kérjük, vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig (több mint 1 hónapig) nem használja.
- △ Ha az elemfelvadász a szemébe kerülne, azonnal öblítse ki bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz.
- △ A túlfűtött mandzsetta zúzdást okozhat. Ne helyezze a mandzsettát sebes bőrfelületre.
- △ A mérések torzulhatnak, ha a készüléket erős elektromos mezők, például televíziók, mikrohullámú sütők, mobiltelefonok vagy más készülékek közelében használják.
- △ Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, például altatógázok vannak jelen. Ne használja a készüléket nagy koncentrációjú oxigénes környezetben.
- △ A készülék és a mandzsetta nem vízálló. Kerülje el, hogy az eső, az izzadság és a víz beszenyezze a készüléket és a mandzsettát.
- △ Ne merítse a készüléket vagy annak bármely alkatrészét vízbe.
- △ Kérjük, hogy a készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa meg.
- △ Ha szükséges, használjon nedves, puha ruhát, majd törölje szárazra egy másik ronggyal vagy tisztaszelal abszorbens pamutot használva. Ne használjon mosószer-t a tisztításhoz.

- △ Tárolja a készüléket és az alkatrészeket tiszta, biztonságos helyen.
- △ Kerülni kell a szélsőséges hőmérsékletet, páratartalmat, közvetlen napfényt, üdőtűdést vagy port.
- △ Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Meghibásodás esetén kérjük, forduljon az eladóhoz, a helyi forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz szakszerű útmutatásért.
- △ A készüléket, alkatrészeket, elemeket és egyéb tartozékokat a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A nem megfelelő ártalmatlanítás környezetszennyezést okozhat.


A legfontosabb vérnyomásmérés érdekében:

1. A mérés előtt 30 perccel ne egyen, ne igyon alkoholt, ne dohányozzon, ne sportoljon és ne fűdjön. A mérés előtt legalább 15 percet pihenjen.
2. Kerülje a mérést, ha stresszesen érzi magát.
3. A méréseket csendes helyen kell elvégezni.
4. Vegyen le minden olyan ruhadarabot, amely szorosan illeszkedik a felkarjához.
5. Üljön egy székre, a teljes talp érintse a padlót. Támassza a karját egy asztalra úgy, hogy a mandzsetta a szíve magasságában legyen. Maradjon mozdulatlanul, és ne beszéljen a mérés alatt.
6. Vezessen feljegyzést a vérnyomás- és pulzusmérésről orvosa számára.
7. Az egyszeri mérés nem biztos, hogy pontosan jelzi az Ön valódi vérnyomását. Több mérést kell végeznie és feljegyeznie egy bizonyos idő alatt.
8. Mérjen rendszeresen, minden nap ugyanabban az időpontban.

Tartozékok

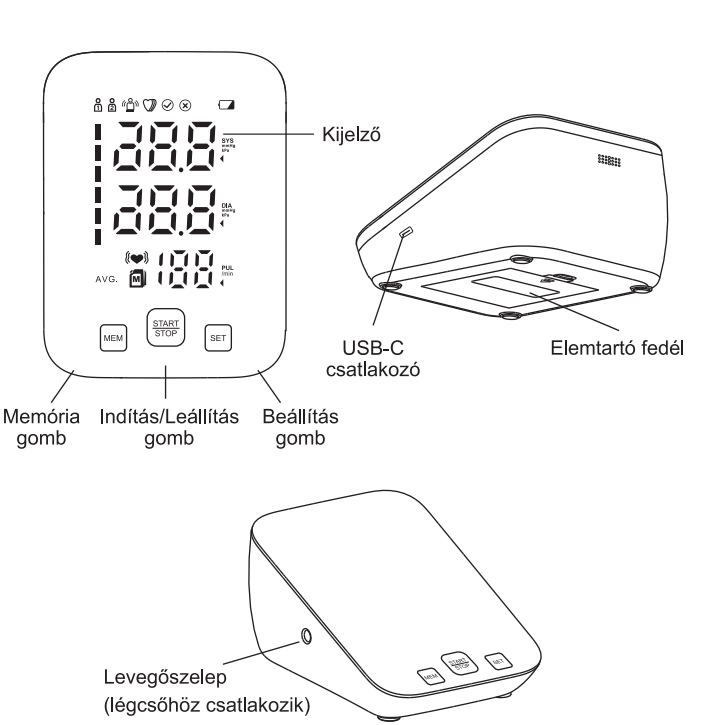

Megjelenített szimbólumok

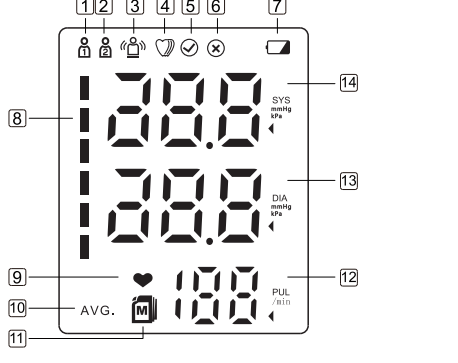

1. Felhasználó 1
2. Felhasználó 2
3. Mozgáshiba szimbólum
4. Szabálytalan szívverés szimbólum
5. Helyes mandzsettahelyezés szimbólum
6. Rossz mandzsettahelyezés szimbólum
7. Töltöttség szimbólum
8. Vérnyomásszint-jelző
9. Szívverés szimbólum
10. Átlagérték szimbólum
11. Memória szimbólum
12. Pulzus
13. Diasztolés vérnyomás
14. Szisztolés vérnyomás

A vérnyomás a vér által az artériák falára kifejtett erő.

- (SYS) A szisztolés nyomás akkor jelentkezik, amikor a szív összehúzódik.
- (DIA) A diasztolés nyomás akkor jelentkezik, amikor a szív kitágul.
- (Pul) A pulzusszám megfelel a szív percenkénti ütésszámának.

Vérnyomásszint-jelző

A WHO vérnyomásmosztályozása szerint a skála a zöldtől (optimális érték) a pirosig (súlyos magas vérnyomás) terjed.

- (AVG) Az utolsó 3 mérés átlagát jeleníti meg.
- (M) A memóriában tárolt korábbi mérések.
- (♥) Villog, amikor a mérés során érzékel az Ön szívverését.
- (☑) Teljes az akkumulátor magas töltöttségi szintje esetén, és villog alacsony töltöttségi szint esetén.

Szabálytalan szívverés szimbólum (⚡)

Ha a készülék szabálytalanul szívverést érzékel, a kijelzőn megjelenik ez a jel. **Mandzsetta önellenzőzés szimbólum (⊗ ⊙).** Helyes szimbólum (⊗ ⊙) akkor jelenik meg, ha a mandzsettát jól helyezték fel, ellenkező esetben a helytelen szimbólum (⊗ ⊙) jelenik meg. Kérjük, ellenőrizze a mandzsettát, ha a helytelen szimbólum (⊗ ⊙) jelenik meg.

Mozgáshiba szimbólum (⚡)

A mozgáshiba szimbólum (⚡) jelenik meg, ha a mérés közben mozog a teste. Kérjük, vegye le a mandzsettát, és várjon 2-3 percet. Helyezze vissza a mandzsettát, és végezzen újabb mérést.

Tápegység

Elemek behelyezése

1. Távolítsa el az elemtartó fedelét.
2. Vegye ki a használt elemeket, ha vannak.
3. Helyezze be az új elemeket az elemtartóba az ábrának megfelelően, ügyelve a megfelelő polarításra (+ és -).
4. Helyezze vissza az elemfedelét. Csak 1,5 V-os, AAA alkáli elemeket használjon.

FIGYELEM!

Kérjük, figyeljen az elemek polarítására. Ha a kijelzőn villog az alacsony töltöttség szimbólum, kérjük, cserélje ki az elemeket. Ne keverje a használt és az új elemeket, mivel lerövidítheti az elemek élettartamát, vagy a készülék meghibásodását okozhatja. Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni. Ellenkező esetben az elemek szivároghatnak és üzemzavart okozhatnak.

USB csatlakoztatás

A készüléket a C típusú kábellel és USB-C hálózati adapterrel (kimenet 5V DC1A) is működtetheti.

Megjegyzés:

- Csak a jóváhagyott adaptert használja, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- a) Győződjön meg róla, hogy az adapter és a kábel sértetlen.
- b) Csatlakoztassa a kábelt a készülék jobb oldalán lévő adapterporthoz.
- c) Csatlakoztassa az adaptert a kábelhez, külső akkumulátorhoz, számítógéphez stb.
- d) Kérjük, vegye ki az összes elemet, ha az USB-t használja a készülék működtetéséhez.
- e) Ha véletlenül megszakad az elektromos áramellátás, kérjük, dugja vissza a kábelt a készülékbe és indítsa újra a vérnyomásmérőt.

Rendszerbeállítás

1. A felhasználó beállítása:


- (1) Kikapcsolt vagy készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot kb. 3 másodpercig, amíg a képernyőn a Felhasználó ikon 1 vagy 2 nem villog. (A legelső felhasználó az 1-es)
- (2) Nyomja meg a [MEM] gombot a tárolni kívánt felhasználó (1 vagy 2) kiválasztásához.
- (3) Nyomja meg a [SET] gombot a Felhasználó (1 vagy 2) megerősítéséhez, és lépjen be az egység beállításába.

2. A mértékegység beállítása:

- (1) Nyomja meg a [MEM] gombot az kPa és mmHg egység közötti váltáshoz. Amikor a képernyőn megjelenik a [p.p], a készülék egysége mmHg. Amikor a képernyőn az [mmHg] jelenik meg, a készülék egysége kPa.
- (2) Nyomja meg a [SET] gombot az egység megerősítéséhez.

3. Nyomja meg a [START/STOP] gombot a beállítások elmentéséhez. Megjegyzés: A kiválasztott felhasználó tárolt mérési adatai összhangban lesznek az egységbeállítással.

4. A mérés befejezésekor a szisztolés és diasztolés nyomásérték, valamint a pulzusszám jelenik meg a kijelzőn. A mandzsetta kiengedi a maradék levegőt és teljesen leereszt.

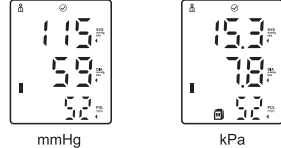

5. Nyomja meg újra a [START/STOP] gombot a készülék kikapcsolásához. Ha 2 perig nem történik semmilyen művelet, a készülék automatikusan kikapcsol.

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

△ FIGYELEM

A mandzsetta szükségesnél nagyobb felfújása zúzdásokat okozhat. Ha az Ön szisztolés nyomása 220 mmHg-nál magasabb, tartsa lenyomva a START/STOP gombot, amíg az készülék 30-40 mmHg-rel nagyobbra fújja fel a várható szisztolés nyomásnál.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ne alkalmazzon a szükségesnél nagyobb nyomást.
- A mandzsetta nem fújódik 299 mmHg fölé.
- Amikor a mérés befejeződött, a mandzsetta teljesen leereszt és az Ön vérnyomása és pulzusszáma megjelenik a kijelzőn.
- Ha bármilyen okból (pl. a beteg rosszul érzi magát) meg kell szakítani a mérést, nyomja meg a Start/Stop gombot.

Memória funkció

Tárolt mérések megtekintése

1. Nyomja meg a [MEM] gombot a memóriafunkcióba való belépéshez.
2. Az első AVG-vel megjelenített érték az utolsó 3 mérés átlagértékét, majd a legutóbbi mérés eredményét jeleníti meg. (M1, M2, M3,...)

Megjegyzés:

- A kiválasztott felhasználó tárolt mérési értékei összhangban lesznek a készülék beállításával.
- Ha a mérési memória aritmiát mutat, az a szívritmuszavar jele. C. Ez a készülék 2'90 mérési eredményt tárol.

Memória törlése:

Tartsa lenyomva a [MEM] gombot, majd egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot 3 másodpercig. Ezután a képernyőn megjelenik ([EEEE ikon]), ami azt jelzi, hogy az összes meglévő mérési adat törlődik.

Megjegyzés:

Ez a művelet az összes rögzített adatot törli. Kérjük, őrizz meg a feljegyzéseket más módon arra az esetre, ha később szüksége lenne rájuk.

Hibajelző és hibaelhárítási tippek

SZIMBÓLUM	OK	KORREKCIÓ
E-1	A jel túl kicsi, vagy a nyomás hirtelen változik.	Helyezze fel a mandzsettát megfelelően, majd ismétlje meg a mérést. Maradjon mozdulatlanul, és ne beszéljen a mérés alatt.
E-2	A külső zavaró jel túl nagy.	A mérés során tartsa távol magát az erős interferenciát okozó eszközöktől, például mobiltelefonoktól, motoroktól és más erős interferenciaforrásoktól.
E-3	Felfújási hiba.	Ellenőrizze, hogy a légszón nem csúszott ki, törött stb. és szorosan csatlakozik-e a légszócsonatlakozó a készülékbe. Ezután ismétlje meg a mérést.
E-5	Abnormális vérnyomás.	Kérjük, pihenjen 30 percet a vizsgálat megismétlése előtt. Ha 3 egymást követő alkalommal abnormális, kérjük, menjen kórházba vagy forduljon orvosához.
	Alacsony töltöttségi szint.	Cserélje ki az elemeket. Lásd az „Elemek behelyezése” című részt.

Hibaelhárítás

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Nincs áram. Semmi sem jelenik meg a kijelzőn.	Cserélje ki az elemeket. Ellenőrizze az elemek polaritását.
A mérési értékek túl magasnak vagy túl alacsonynak tűnnek.	A vérnyomás folyamatosan változik. Számos tényező, többek között a stressz, a napszak és a mandzsetta felhelyezési módja befolyásolhatja a vérnyomását. Olvassa el a biztonsági információk bekezdést.

SZIMBÓLUMJEGYZÉK

A következő szimbólumok jelenhetnek meg ebben a kézikönyvben, a vérnyomásmérőn vagy annak tartozékain. A szimbólumok némelyike a vérnyomásmérővel és annak használatával kapcsolatos szabványokat és előírásokat jelöli.

	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Megfelel a 93/42/EGK orvostechnikai eszközökről szóló irányelv alapvető követelményeinek.
	Gyártási idő
	Gyártó
	Sorozatszám
	BF típusú alkalmazott alkatrész
	Egyenáram
	ÁRTALMATLANÍTÁS: Ezt a terméket nem szabad válogatatlán kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Az ilyen hulladékot külön kell gyűjteni speciális kezelésre.
	Kövesse a használati utasításokat
	Így felfelé
	Törékeny
	Nedvességtől távol tartandó
	Kerülje a közvetlen napfényt
	Óvatosan kezelje
	Tárolási hőmérséklet
	Orvostechnikai eszköz
	II. osztályú orvostechnikai eszköz
	Közepes méretű szilárd tárgyak ellen védett (>12 mm); Függetlenül csapóvíztől és víz ellen védett (pl. csapadópó víz)
	Referenciaszám
Nincs sterilizálási követelmény	
Nem AP / APG kategóriájú berendezés	
Működési mód: folyamatos	

Ápolás és karbantartás

A készülék legjobb állapotban tartása és megóvása érdekében kérjük, hogy kövesse az alábbiakban felsorolt utasításokat:

- 1) Minden mérés előtt és után mosson kezet.
- 2) Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, nedvességnek, pornak és közvetlen napfénynek.
- 3) Ne hajlítsa meg erősen a mandzsettát, hogy elkerülje annak károsodását.
- 4) Ne húzza a csövet. Ne hagyja, hogy a cső elgörbüljön, és tartsa távol az éles tárgyaktól.
- 5) Tárolja a készüléket és az alkatrészeket tiszta, biztonságos helyen. Ne tegye ki a készüléket erős ütéseknek, és ne bányon vele durván.
- 6) Ezt a készüléket csak felnőttek használhatják. Gyermekek történő használatát előtt konzultáljon orvosával. Gyermekek nem használja ezt a készüléket felügyelet nélkül.
- 7) Tisztítsa a készüléket puha, száraz ruhával. Ne használjon gázt, higított vagy hasonló oldószereket. A mandzsettán lévő foltok óvatosan eltávolíthatók nedves ruhával és szappanos vízzel. A mandzsettát nem szabad mosogatógépben, mosógépben vagy vízbe merítve mosni.
- 8) Vegye ki az elemeket, ha a készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, és amikor újra használni kezdi, cserélje ki az elemeket újakra.
- 9) Ne próbálja meg a készüléket saját maga karbantartani vagy javítani. A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő kezelés, baleset, szakszerűtlen használat, a használati utasítás be nem tartása vagy a készüléken harmadik személy által végzett módosításokra.
- 10) Az elemeket és az elektronikus alkatrészeket a helyileg érvényes előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Korlátozott jótállás

A készülékre a vásárlástól számított 1 év gyártói garanciát vállalunk, kizárólag az eredeti vásárló részére. A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő kezelés, baleset, szakszerűtlen használat, a használati utasítás be nem tartása vagy a műszeren harmadik fél által végzett módosítások által okozott károokra. A garancia csak a fő készülékre és annak mandzsettájára vonatkozik. Az elemekre vagy a régi elemek okozta károka nem vonatkozik a garancia. A garancia a normál használatra korlátozódik. A garanciális szerviz igénybevételehez forduljon az e-kereskedelmi eladóhoz, a helyi forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.

Tanúsítványok

Készülékszabvány:

A készüléket úgy gyártották, hogy megfeleljen az európai vérnyomásmérőknök: EN1060-1•EN1060-3•IEC 80601-2-30•ISO81060-1•IEC60601-1•11•IEC60601-1

Elektromágneses kompatibilitás:

Megfelel az IEC60601-1-2 nemzetközi szabvány előírásainak.

Technikai specifikációk

Kijelző	Digitális LED kijelző
Mérési tartomány	Nyomás: 0 - 280 mmHg ; Pulzus: 40 - 180/perc
Pontosság/Kalibrálás	Nyomás: +3mmHg Pulzus: +5% a leolvasott értékéből
Felfújás	Automatikus elektromos pumpával
Leeresztés	Automatikus leeresztő szeleppel
Gyors légkioldó	Automatikus leeresztő szeleppel
Mérési mód	Oscillometrikus módszer
Energiaforrás	4*AAA méretű, 1,5 V-os alkáli elemek
Működési hőmérséklet /páratartalom	+41°F és +104°F (5°C és 40°C között /15 és 80% RH között
Tárolási hőmérséklet	-4 °F - +131 °F(-20°C - 55°C) /10 - 93% RH
Mandzsetta mérete	22-től 42 cm-ig
Memória	Felhasználónként legfeljebb 90

MEGJEGYZÉS: Ezek a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EMC nyilatkozat

Elektromágneses kompatibilitási tartozékok:			
Írányelvek és gyártói nyilatkozat - Elektromágneses sugárzás			
A vérnyomásmérőt a következő elektromágneses környezetben történő használatra tervezték, és a vásárlónak vagy felhasználónak biztosítania kell, hogy a készüléket ebben az elektromágneses környezetben használják.			
Teszt	Megfelelőesség	Elektromágneses környezet - Útmutató	
RF kibocsátás GB 4824	set	A vérnyomásmérő kizárólag rádiófrekvenciás energiát használ belső működéséhez. Ezért alacsony a rádiófrekvenciás kisugárzása, és kevésbé valószínű, hogy interferenciát okoz a közeli elektronikus berendezésekben.	
RF kibocsátás GB 4824	B osztály	Az eszköz minden létesítményben használható, beleértve az otthoni környezetet is, és közvetlenül csatlakoztatható a háztartási alacsony feszültségű hálózathoz.	
Harmonikus kibocsátások GB 17625.1	nem alkalmazható	Az eszköz minden létesítményben használható, beleértve az otthoni környezetet is, és közvetlenül csatlakoztatható a háztartási alacsony feszültségű hálózathoz.	
Feszültségingadozás /világítási zavarok kibocsátása GB 17625.2	nem alkalmazható	Az eszköz minden létesítményben használható, beleértve az otthoni környezetet is, és közvetlenül csatlakoztatható a háztartási alacsony feszültségű hálózathoz.	

Írányelvek és gyártói nyilatkozat - Elektromágneses zavartűrés			
A vérnyomásmérőt a következő elektromágneses környezetben történő használatra tervezték, és a vásárlónak vagy felhasználónak biztosítania kell, hogy a készüléket ebben az elektromágneses környezetben használják.			
Immunitás vizsgálat	EC 60601 teszt szint	Megfelelési szint	Elektromágneses környezet
Elektrosztatikus kitörés GB/T 17626.2	±6 kV érintkező kisülés ±8 kV levegő kisülés	±6 kV érintkező kisülés ±8 kV levegő kisülés	A padlókán fából, betonból vagy csempeből kell lennie, és ha szigetelt anyagokkal van borítva, a relatív páratartalomnak legalább 30%-osnak kell lennie.
Elektromos gyors tranzienk kitörés GB/T 17626.4	±2kV teljesítményre	nem alkalmazható	A hálózati áramnak kereskedelmi vagy körházi környezetben használt minőségűnek kell lennie.
Tűlfeszültség GB/T 17626.5	±1 kV vezetékekről vezetékekre ±2 kV vezetékektől földig	nem alkalmazható	A hálózati áramnak kereskedelmi vagy körházi környezetben használt minőségűnek kell lennie.
Feszültségcsúcsok nések, rövid megszakítások és feszültségváltozások a tápegység bemeneti vonalán GB/T 17626.11	<5 % UT, 0,5 cikluson keresztül (UT-nál, >95%-os merülés) 40% UT, 5 cikluson keresztül (UT-nál, 60%-os merülés) 70 % UT, 25 cikluson keresztül (UT-nál, 30%-os merülés) <5 % UT, 5 másodperc (UT-nál, >95%-os merülés)	nem alkalmazható	A hálózati áramnak olyan minőségűnek kell lennie, mint amelyet egy tipikus kereskedelmi vagy körházi környezetben használnak. Ha a vérnyomásmérő felhasználó-jának folyamatos működésére van szüksége az áramszünetek alatt, ajánlott a vérnyomásmérőt megszakítás nélküli tápegységgel vagy elemmel táplálni.
Teljesítményfrekvenciás mágneses mező (50/60Hz) GB/T 17626.8	3A/m	3A/m, 50/60Hz	A hálózati frekvenciájú mágneses térnek meg kell felelnie egy tipikus kereskedelmi vagy körházi környezetben található mágneses tér szintjének.

Megjegyzés: Az U_i a feszültségű alkalmazása előtt váltakozó áramú hálózati feszültséget jelenti.

Írányelvek és gyártói nyilatkozat - Elektromágneses zavartűrés			
A vérnyomásmérőt a következő elektromágneses környezetben történő használatra tervezték, és a vásárlónak vagy felhasználónak biztosítania kell, hogy a készüléket ebben az elektromágneses környezetben használják.			
Immunitás vizsgálat	EC 60601 teszt szint	Megfelelési szint	Elektromágneses Környezet
RF-vezetés GB/T 17626.6 sugárzás GB/T 17626.3	3 V (RMS) 150kHz ~ 80MHz 3V/m 80MHz~ 2.5GHz	3V (RMS)	A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket nem szabad a vérnyomásmérő egyetlen részéhez sem közelebb használni, beleértve a kábeleket is, mint az ajánlott távolság. Ezt a távolságot az adott frekvenciájának megfelelő képlettel számíthat ki. Ajánlott elkülönítési távolság d = 1,2 * p d = 1,2 * p 80MHz~800MHz d = 2,3 * p 800 MHz és 2,5 GHz között, ahol: P Az adott gyártója szerinti maximális adóteljesítmény Névleges kimeneti teljesítmény wattban (W); d -ajánlott távolság, méterben (m). Minden egyes frekvenciaterományban alacsonyabbnak kell lennie a megfelelősségi szintnél b. A következő szimbólumokkal jelölt berendezések közelében interferencia léphet fel. (☞)

-