


Használati útmutató



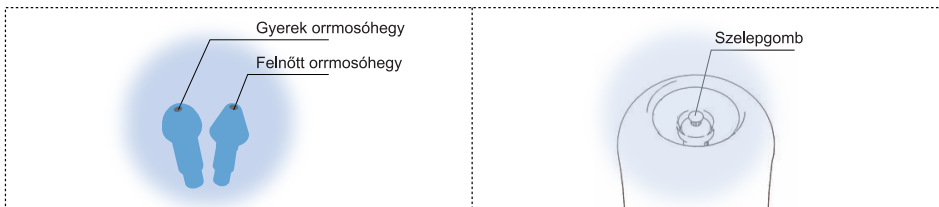

REF YT-300 Úrtartalom: 300ml

Felépítés és tulajdonságok

Szabadalmi védjeggyel ellátott termék. A flakon megfelel az élelmiszeripari szabványoknak. Az Elysium orrmosó egy rugalmas palackból, két orrmosóhegyből (1 felnőtt és 1 gyermek méret), egy szelepgombból és egy hajlított csőből áll. A termék egyszerűen kezelhető és könnyen hordozható, ideális választás a mindennapos orrápoláshoz.



Hogyan kell használni

<p>1</p>  <p>Töltsön egy tasak (2,7g) Elysium orrmosó sót a palackba.</p>	<p>2</p>  <p>Öntsön 37-40°C-os vizet a jelölésig (300ml). Használjon szűrt, tisztított vizet (ne használjon ásványvizet vagy csapvizet).</p>
<p>3</p>  <p>Miután a só feloldódott, csavarja rá kupakot és helyezze fel a hajlított cső végére a megfelelő orrmosóhegyet.</p>	<p>4</p>  <p>Hajoljon kissé előre, és fordítsa oldalra a fejét úgy, hogy az egyik orrlyuka feljebb kerüljön a másiknál. Dugja az orrmosóhegyet a magasabban levő orrlyukába. Közben szájon keresztül lélegezzen. Nyomja meg a palack alján lévő szelepgombot az orröblítés megkezdéséhez úgy, hogy a víz a másik orrlyukából folyjon ki. Az öblítés leállításához csak engedje el a szelepgombot. Húzza ki az orrából az orrmosóhegyet, és ismételje meg a folyamatot a másik orrlyukában is.</p>

Óvintézkedések

- Ne használjon közvetlen csapvizet; szűrt, tisztított sóoldatos vízzel öblítse át az orrát.
- Ne használjon konyhai sót az Elysium orrmosó só helyett.
- Ne használja orrdugulás, középfülgyulladás vagy más fülbetegség esetén.
- A terméket 8 éves kor alatti gyermekek kizárólag orvosi vagy szülői felügyelet mellett használhatják.
- Minden használat előtt alaposan tisztítsa meg az terméket.
- Az Elysium orrmosó egyéni felhasználásra szánt higiénés termék, ne ossza meg másokkal.

Tárolás

- Hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolja. Közvetlen napsugárzásnak ne tegye ki, maró folyadékoktól vagy gázoktól távol tartandó.

Szimbólumjegyzék

	Olvassa el a használati utasítást		Gyártási tételszám
	Napsugárzástól óvni kell		Cikkszám #
	Nedvességtől óvni kell		Hivatalos képviselő az EU-ban
	Gyártás ideje		Gyártó
	A csomag darab terméket tartalmaz		CE-megfelelőségi jelölés



Waterpulse (Shanghai) Industrial Co., Ltd

Level 1, Tower 1, 1501 Jin Sui Road
Pudong New Area, Shanghai, China

Importőr: **Legal Beauty Kft.**

Cím: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
Elérhetőség: +36-70-7-999-999

Web: www.virusmaszk.hu

E-mail: info@virusmaszk.hu



SUNGO Europe B.V.

T.a.v. de heer R. Luo Fascinatio
Boulevard 522 (Unit 1.7) 2909 VA
Capelle aan den IJssel