

Használati utasítás Vizeletgyűjtő zsák			Készítette	Li Xiuren
			Ellenőrizte	Zhou Ting
Dokumentum szám	KB/CE01-08		Jóváhagyta	Zhou Hongbao
Érvényes	2022.03.01	Ver. B/0	Oldalszám	1/2 oldal

Használati útmutató

[Termék neve]: Vizeletgyűjtő zsák

[Leírás]: 1000ml, 1500ml, 2000ml, 2000+200ml, 2000+500ml, 2600+400ml, 2600+500ml.

[Anyagok]: PVC fólia (zsák), PVC (csatlakozócső, csatlakozó), PP (akasztó stb.)

[Általános termékleírás]: A vizeletgyűjtő zsák a következőkből áll: zsák, keresztzelep-tömítés, keresztzelep, folyadékbevezető tömítés, lélegző fólia, kapocs, akasztó, kötés, folyadékbevezető cső, lemezkapocs, mintacsatlakozó, védősapka.

[Használat]: Vizelet tárolására szolgáló, vízvezető csővel összekötött vizeletgyűjtő zsák, klinikai használatra. Nem érintkezik közvetlenül a testtel. Egyszer használatos. Használati idő: rövid távú.

[Sterilizálás]: EO-val sterilizált **[Szavatosság]:** 5 év

[Felhasználási módszer]:

- Ellenőrizze a zsák és a csatlakozócső közötti kapcsolatot.
- Csatlakoztassa a vizeletgyűjtő zsákot a nelaton csőhöz, állítsa le a vizeletgyűjtő zsákot.

[Figyelmeztetések]:

- Kizárólag egy ember használhatja.
- Steril, ha a csomagolás bontatlan vagy sérülésmentes.
- Tárolja száraz, hűvös és napfénytől védett helyen.

[Tárolás és szállítás]:

1. A készüléket 80%-nál kisebb relatív páratartalom mellett, jól szellőző és tiszta körülmények között kell tárolni. Korróziós gázoktól távol tartandó.
2. A készüléket szállítás és használat során óvatosan kell kezelni.

Használati utasítás Vizeletgyűjtő zsák			Készítette	Li Xiuren
			Ellenőrizte	Zhou Ting
Dokumentum szám	KB/CE01-08		Jóváhagyta	Zhou Hongbao
Érvényes	2022.03.01	Ver. B/0	Oldalszám	2/2 oldal

[Gyártó]:

Changshu Kangbao Medical Appliance Factory
Furong Village, Baimao, Guli Town, 215500 Changshu City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA











Az Európai Unió meghatalmazott képviselője:

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munich, Germany
Phone: +49(0)89 189174474
Fax: +49(0)89 5485 8884
Email: info@medpath.pro

Importőr: Legal Beauty Kft.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
+36-70-7-999-999
www.virusmaszk.hu
info@virusmaszk.hu

[Szimbólumok]

	CE jel		Lot szám
	Egyszer használatos		Gyártási idő
	EO-val sterilizált		Gyártó
	Felhívás		Az Európai Unió meghatalmazott képviselője
	A termék DEHP-t tartalmaz		Jelzi, hogy a termék orvostechikai eszköz