

Használati utasítás Vizeletgyűjtő zsák gyerekeknek			Készítette	Li Xiuren
			Ellenőrizte	Zhou Ting
Dokumentum szám	KB/CE01-08		Jóváhagyta	Zhou Hongbao
Érvényes	2022.03.01	Ver. B/0	Oldalszám	1/2 oldal

Használati útmutató

[Termék neve]: Vizeletgyűjtő zsák gyerekeknek

[Leírás]: 100ml,200ml

[Anyagok]: Testzsák (PE-fólia), kétrétegű ragasztó (vízoldható forró olvadákragasztó), védőpapír (fényes papír).

[Általános termékleírás]: Vizeletgyűjtő zsák gyerekeknek: zsák.

[Használat]: Klinikai használatra szánt vizelet gyűjtésére alkalmas zsák.

[Sterilizálás]: EO-val sterilizált **[Szavatosság]:** 5 év

[Felhasználási módszer]:

1. Bontsa ki a vizeletzsákot.
2. Terítse ki a zsákot.
3. Távolítsa el a matricát és ragassza fel a gyerek testére (nemiszerv).
4. Gyűjtse a vizeletet a zsákba.
5. Ha megtelt, óvatosan távolítsa el a zsákot a gyerek testéről.
6. Ügyeljen arra, hogy ne lötyintse ki a vizeletet.
7. Használat után azonnal dobja ki.

[Figyelmeztetések]:

- Egyszer használatos.
- Steril, ha a csomagolás bontatlan vagy sérülésmentes.
- Tárolja száraz, hűvös és napfénytől védett helyen.

[Tárolás és szállítás]:

1. A készüléket 80%-nál kisebb relatív páratartalom mellett, jól szellőző és tiszta körülmények között kell tárolni. Korróziós gázoktól távol tartandó.
2. A készüléket szállítás és használat során óvatosan kell kezelni.

Használati utasítás Vizeletgyűjtő zsák gyerekeknek		Készítette	Li Xiuren
		Ellenőrizte	Zhou Ting
Dokumentum szám	KB/CE01-08		Jóváhagyta Zhou Hongbao
Érvényes	2022.03.01	Ver. B/0	Oldalszám 2/2 oldal

Gyártó:

Changshu Kangbao Medical Appliance Factory
Furong Village, Baimao, Guli Town, 215500 Changshu City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA











Az Európai Unió meghatalmazott képviselője:

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munich, Germany
Phone: +49(0)89 189174474
Fax: +49(0)89 5485 8884
Email: info@medpath.pro

Importőr: Legal Beauty Kft.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
+36-70-7-999-999
www.virusmaszk.hu
info@virusmaszk.hu

[Szimbólumok]

	CE jel		Lot szám
	Egyszer használatos		Gyártási idő
	EO-val sterilizált		Gyártó
	Felhívás		Az Európai Unió meghatalmazott képviselője
	A termék DEHP-t tartalmaz		Jelzi, hogy a termék orvostechnikai eszköz