

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT:

Olyan lehetséges veszélyeztetet jelet, amit, ha nem kerülünk el akkor az életveszélyhez, vagy súlyos sérüléshez vezethet.

(Használat)

- Gondoskodjon felügyelőiről, ha a készüléket gyermekek vagy fogyatékkal élők használik, illetve ha gyermekek vagy fogyatékkal élők közelében használják.
- Győződjön meg arról, hogy a légtérrelő, a légszűrő és más alkatrészek megfelelően vannak rögzítve.
- Győződjön meg arról, hogy a légszűrő tiszta. Ha a légszűrő színe elváltozott, vagy átlagosan 60 napnál hosszabb ideig használták, cserélje ki egy újra.
- Ne döntse meg a porlasztókezelőket 45°-nál nagyobb szögben, és ne rázza használat közben.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket úgy, hogy a levegőcső meg van törve.
- Kizárólag emberi használatra.
- Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. A nem támogatott alkatrészek használata károsíthatja a készüléket.
- Ne töltsön 7 ml-nél több gyógyszert a gyógyszeres csészébe.
- Ne ejtse le a készüléket, és óvja az erős ütésektől.
- Ne hajlítsa a terelőlapot, illetve ne szúrja meg a gyógyszeres csésze fűvókáját túlvel stb.
- Ne dugja az újítát vagy más tárgyakat a kompresszor belsejébe.
- Ne szedje szét és ne próbálja megjavítani a kompresszort vagy a tápkábelt.
- Ne zárja el a kúpak és az levegő beömlőnyílás közötti rést.
- Ne használjon mikrohullámú sütőt vagy használatát a porlasztó alkatrészek szárazsághoz.
- A gyártó által jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a garanciát.

(Áramütés veszélye)

- Megfelelő feszültségű környezetbe csatlakoztassa a készüléket. Ne terelje túl a kábelkötőket, és ne használjon hosszút.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket a kábelkötőből.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt.

(Karbantartás és tárolás)

- Ne szállítsa, és ne csomagolja el az inhalátor úgy, hogy a gyógyszeres pohárba folyadék van.
- Az alkatrészek forralással történő sterilizálásakor ügyeljen arra, hogy a tartályt ne melegítse szárazon.
- Soha ne tegye a kompresszort, a tápkábelt vagy az inhalátor tartozékait mikrohullámú sütőbe, és ne próbálja meg géppel megszáritani azokat.

Általános biztonsági előírások:

Minden egyes használat előtt ellenőrizze a készüléket és a tartozékokat, hogy azok épek, nem sérültek; különös tekintettel alábbiakra:

- Hogy a terelőlap, a fűvóka vagy a levegőcső nem sérült-e meg.
- Hogy a fűvóka nincs-e eltömődve.
- Hogy a kompresszor normálisan működik-e.

3

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- 1. lépés:** Szappanos vízzel mosson kezét.
- 2. lépés:** Szerelje össze az inhalálót az igény szerinti kivitelben: gyerek maszk, felnőtt maszk, csutóra.
- 3. lépés:** Töltse fel az ovosva által meghatározott gyógyszerrel a porlasztócsészét.
- 4. lépés:** Csatlakoztassa az inhalálót a levegőcsővön keresztül a kompresszorhoz.
- 5. lépés:** Csatlakoztassa a levegőcső egyik végét a kompresszor látkimenetéhez. A csatlakozásnak szorosan kell illeszkednie.
- 6. lépés:** Csatlakoztassa a kompresszort az elektromos hálózathoz.

GYÓGYSZERADAGOLÁS

- 1. Vegye fel az inhalálót a képen látható módon.**

- 2. Billentse át a kapcsolót a bekapcsolt (I) állásba.** Elindul a kompresszor, és megkezdődik a porlasztás.

MEGJEGYZÉS:

Végezzen tesztet, figyelje meg, hogy keletkezik-e aeroszol.

A porlasztás leállításához billentse vissza a kapcsolót a kikapcsolt (O) állásba.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a kompresszor szellőzőnyílásait, mert túlmelegedhet, vagy meghibásodhat.

⚠ VIGYÁZAT: Ne takarja le a légszűrő burkolatát.

3. Az orvos utasításainak megfelelően inhalálja a gyógyszert.

A csutóra használata: Vegye a csutórát a szájába, és lélegezze be a gyógyszert. A kilégzést is a csutórán keresztül végezze.

A maszk használata: Helyezze fel a maszkot úgy, hogy az takarja az orrát és a száját. Lélegezze be a gyógyszert, majd lélegezze ki a maszkon keresztül.

MEGJEGYZÉS: Ha túl sok az aeroszol, tegye fel a belégzőszelep sapkáját.

GYÓGYSZERADAGOLÁS

4. Folytassa az inhalálást.

Amikor befejezte a gyógyszer inhalálását, kapcsolja ki a kompresszort. Nyomja a hálózati kapcsolót a kikapcsolt (O) állásba.

5. Ha befejezte a gyógyszer inhalálását, kapcsolja ki a kompresszort. Billentse vissza a kapcsolót a kikapcsolt (O) állásba.

6. Húzza ki a levegőcsövet az inhalátorból.

MEGJEGYZÉS:

A levegőcsövet a dugónál fogva húzza ki az inhalátorból.

7. Ellenőrizze, hogy a levegőcsőben nem maradt-e nedvesség.

Ha maradt némi folyadék a levegőcsőben, az alábbiak szerint kell azt onnan eltávolítani.

- 1) Győződjön meg róla, hogy a levegőcső még mindig a kompresszorhoz van csatlakoztatva.
- 2) Kapcsolja be a kompresszort, és nyomja át a levegőt a csővön, hogy kidolgozza belőle a nedvességet.

8. Húzza ki a levegőcsövet a kompresszorból is.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

A csőben páralecsapódás keletkezhet. Ne pakolja el a levegőcsövet, amíg páralecsapódás vagy folyadék van benne, mert ez baktériumfertőzést okozhat.

9) Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.

5

6

HIBAELHÁRÍTÁS

MŰSZAKI LEÍRÁS

Az itt leírtak szerint járjon el, ha a készülék működés közben meghibásodik.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Bekapcsoláskor semmi sem történik.	A hálózati csatlakozó be van dugva egy konnectorba?	Ellenőrizze, hogy a dugó be van-e dugva a konnectorba. Szükség esetén húzza ki, majd dugja be újra a dugót.
Nincs porlasztás vagy alacsony porlasztási sebesség, amikor a készülék be van kapcsolva.	Van gyógyszer a porlasztócsésében? Túl sok, vagy túl kevés a gyógyszer a porlasztócsésében? Hiányzik a terelőlap, vagy nem jól van összeszerelve? Az inhalátor jól van összeszerelve? A fűvoka eltömődött? Az inhalátor túlzott mértékben meg van döntve? Megfelelően van csatlakoztatva a levegőcső? A levegőcső megtört vagy sérült? A levegőcső eltömődött? Koszos a légszűrő?	Töltse meg a porlasztócsét. Gondoskodjon a megfelelő mennyiségű gyógyszerről. Megfelelően helyezze fel a terelőlapot. Jól szerelje össze az inhalátort. Győződjön meg arról, hogy a fűvoka nem dugult el. Győződjön meg arról, hogy az inhalátor nincs 45 foknál nagyobb szögben megdöntve. Győződjön meg arról, hogy a levegőcső megfelelően csatlakozik a kompresszorhoz és az inhalátorhoz. Győződjön meg arról, hogy a levegőcső nem sérült. Győződjön meg arról, hogy a levegőcső eltömődött. Cserélje ki a légszűrőt egy új szűrőre.
A készülék rendkívül hangos.	A légszűrőfedél megfelelően van rögzítve?	Rögzítse helyesen a légszűrőfedelet.
A készülék nagyon forró.	Elzáródott a szellőzőnyílások?	Nézarja el a szellőzőnyílásokat.

MEGJEGYZÉS:

Ha a javasolt megoldás nem oldja meg a problémát, ne próbálja meg a készüléket megjavítani. A készülék egyetlen alkatrese sem szervizelhető a felhasználó által. Vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel.

Typus	Kompresszoros inhalátor
Tápegység	AC220V 50 Hz
Teljesítmény	130W
Zajszint	≤65dB
Permetezés mértéke	≥0.2ml/min
Üzemi nyomástartomány	60KPa - 130KPa
Megmaradó folyadék	≤0.7ml
Környező hőmérséklet	Normál üzemi körülmények: 5°C~40°C Szállítás és tárolás: -20°C~+55°C
Relatív páratartalom	Normál üzemi körülmények: ≤80% Szállítás és tárolás: ≤93%
Tartalom	Kompresszor, inhalátor, levegőcső, 5db csereszűrő, maszk, használati utasítás

MMD = tömegközéppátréteg

MEGJEGYZÉSEK:

- Előzetes értesítés nélkül technikai módosítások lehetségesek.
- Vegye figyelembe, hogy ezen specifikációk az adott gyógyszerrel függően változhatnak.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyúlékony gáznak lehet kitéve.
- A készülék megfelel az EMC szabványnak. Ha azonban más orvosi eszközökkel vagy elektromos berendezésekkel együtt használják, azok befolyásolhatja a működését.
- Kérjük, kövesse használati útmutatóban leírtakat, és minden tartozékot rendeltetésének megfelelően használjon.

9

10

GARANCIA/SZERVÍZ

Garanciális feltételek és szabályok

1. A termékre egy év garancia vonatkozik a vásárlás időpontjától számítva.
2. A garancia csak a készülék javítására vonatkozik.

3. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- A. Ha a készüléket manipulálnak/felnyitottnak találják.
- B. A használati útmutatóban foglalt utasításoktól eltérő működtetés esetén.
- C. A garancia nem terjed ki az elhasználódott alkatrészekre és tartozékokra, mint például a levegőcső, maszk, kamra, csutóra, biztosíték és tápkábel.
- D. A garancia csak akkor érvényes, ha a készüléket a kereskedő dátummal és aláírással ellátott, cégserűlen lepecsételt garanciajeggyel együtt adja el.

4. A garancián kívüli javítási szolgáltatás a költségeknek megfelelően kerül felszámításra.
5. A garanciával vagy a termékkel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

11

ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

Inhalátor

Porlasztócsésze

Levegőcső

Légszűrő (x5)

Csutóra

Szűrősapka

Maszk (felnőtt)

Maszk (gyerek)

12